

EPITELIALES



NUMERO IDENTIFICATIVO
 CONEXIÓN ESTRELLA
 LONGITUD TRANSMUCOSA
 EMERGENCIA CÓNICA
 FIJACIÓN

En la sistemática Essential® Cone es imprescindible el uso de los Epiteliales de Titanio una vez finalizada la cirugía de colocación de implantes. Con ello se garantiza la obtención de una emergencia cónica alrededor del implante y se facilita el correcto asentamiento de los diferentes aditamentos en la fase prostodóntica.

La elección del epitelial depende del tipo de cirugía realizada y de la conformación del tejido blando alrededor del implante. Para ello se dispone de diferentes alturas y diámetros a fin de escoger la mejor solución en cada caso.

Los tapones de cierre cubren únicamente la conexión del implante. Están indicados en cirugías de dos fases y/o regeneración ósea. Disponibles en Titanio y en Pom C, éste último incluido únicamente en el transportador del implante.

En situaciones en las que se pongan en práctica técnicas de Regeneración Tisular Guiada [RTG], en sentido vertical u horizontal, donde se combine la colocación de membranas y/o láminas, se pueden inmovilizar al implante con el Epitelial de Titanio RTG EC.









































ADVERTENCIAS

SE RECOMIENDA COLOCAR LOS EPITELIALES Y TORNILLOS DE CIERRE DE FORMA MANUAL.

LOS EPITELIALES DE TITANIO Y LOS TAPONES DE CIERRE DEBEN DE ESTERILIZARSE ANTES DE SU USO [VER FOLLETO DE INSTRUCCIONES I-0001] Y NO SON REUTILIZABLES.

ES IMPORTANTE LA BUENA CONSERVACIÓN DE LOS ADAPTADORES PARA SU UTILIZACIÓN COMO TRANSPORTADOR.

EL FALLO EN EL SOPORTE DE LOS INSTRUMENTOS EN BOCA PUEDE PROVOCAR SU DESPRENDIMIENTO EN EL INTERIOR DE LA CAVIDAD BUCAL Y SU POSIBLE DEGLUCIÓN O ASPIRACIÓN.

10 05 02		TAPON DE CIERRE TI	APLICACIÓN CON ADAPTADOR ESTRELLA. UTILIZAR EN DIÁMETROS 3.5 - 4.0 - 4.5 - 4.8 MM.		 
10 05 05		EPITELIAL TI EC [2 MM]	APLICACIÓN CON ADAPTADOR ESTRELLA. UTILIZAR EN DIÁMETROS 3.5 - 4.0 - 4.5 MM.		 
10 05 06		EPITELIAL TI EC [3.5 MM]	APLICACIÓN CON ADAPTADOR ESTRELLA. UTILIZAR EN DIÁMETROS 3.5 - 4.0 - 4.5 MM.		 
10 05 07		EPITELIAL TI EC [5 MM]	APLICACIÓN CON ADAPTADOR ESTRELLA. UTILIZAR EN DIÁMETROS 3.5 - 4.0 - 4.5 MM.		 
10 05 08		EPITELIAL TI RTG EC	APLICACIÓN CON ADAPTADOR ESTRELLA. UTILIZAR EN DIÁMETROS 3.5 - 4.0 - 4.5 MM.		 
10 05 09		EPITELIAL TI EC [1.5 MM]	APLICACIÓN CON ADAPTADOR ESTRELLA. UTILIZAR EN DIÁMETROS 3.5 - 4.0 - 4.5 MM.		 
10 05 10		EPITELIAL TI EC ESTÉTICO [2.5 MM]	APLICACIÓN CON ADAPTADOR ESTRELLA. UTILIZAR EN DIÁMETROS 3.5 - 4.0 - 4.5 MM.		 
10 05 11		EPITELIAL TI EC ESTÉTICO [3.5 MM]	APLICACIÓN CON ADAPTADOR ESTRELLA. UTILIZAR EN DIÁMETROS 3.5 - 4.0 - 4.5 MM.		 
10 05 05 G		EPITELIAL TI EC G [2.5 MM]	APLICACIÓN CON ADAPTADOR ESTRELLA. UTILIZAR EN DIÁMETROS 4.8 MM.		 
10 05 06 G		EPITELIAL TI EC G [4 MM]	APLICACIÓN CON ADAPTADOR ESTRELLA. UTILIZAR EN DIÁMETROS 4.8 MM.		 

TAPON DE CIERRE*



UTILIZA EN DIÁMETROS 3.5 - 4.0 - 4.5 - 4.8 MM.
INCLUIDO EN EL TRANSPORTADOR DEL IMPLANTE.




EPITELIALES ESTÉTICOS

Dos tipos de epiteliales específicos para casos comprometidos, debido a la anatomía de los tejidos blandos y la situación de los implantes.

El epitelial de Titanio de 1.5 mm tiene una salida de emergencia muy cónica llegando a una anchura de 5.7 mm con 1.5 mm de altura. Está indicado en casos en los que el hombro del implante está colocado mínimamente subgingival, y la emergencia de la futura prótesis vaya a ser ancha.

Los epiteliales estéticos tienen un biselado y están indicados para su colocación en frentes anteriores, orientando el biselado en vestibular. El biselado permite conservar mayor tejido epitelial en vestibular, permitiendo y facilitando su posterior manejo para la obtención de un resultado estético. Dos alturas transmucosas, según la situación del hombro del implante.

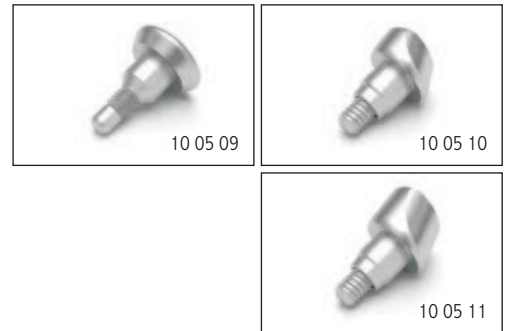

PRODUCTOS RELACIONADOS

- 10 08 11 ADAPTADOR ESTRELLA PARA DIN.
- 10 08 11 L ADAPTADOR ESTRELLA LARGO PARA DIN.
- 10 08 08 PUNTA C/A ESTRELLA